


# A4 | PROPOL therapy

## PULIZIA E MANUTENZIONE

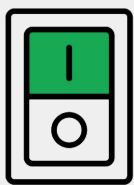

### IN SICUREZZA

Spegnere l'apparecchio prima di ogni operazione di pulizia e scollegare il cavo di rete dalla presa.

### PULIZIA DEL DIFFUSORE

Utilizzare un panno umido con detergente antibatterico per la pulizia del diffusore e dell'esterno del tubo.



### SANIFICAZIONE DEGLI ACCESSORI (TUBO E MASCHERA)



Possibilità di varie soluzioni:

- 1) In acqua calda (circa 40°C) con detergente delicato per piatti;
- 2) Mediante immersione in una soluzione di acqua e aceto, nelle proporzioni rispettivamente di  $\frac{3}{4}$  e  $\frac{1}{4}$ , oppure in acqua e sodio bicarbonato;
- 3) mettere in ammollo in acqua fredda con un bicchiere piccolo di disinfettante per circa 15 minuti.

### RISCIACQUO E ASCIUGATURA FINALE

Terminata la pulizia, occorre sgocciolare bene i componenti su una superficie pulita e poi asciugare con un panno morbido. Prima di riporre il diffusore, accertarsi che sia ben asciutto.




### UTILIZZO DELLA MASCHERINA



La mascherina è per uso personale, quindi può essere utilizzata da un solo paziente per trarne il massimo beneficio ed evitare la diffusione di germi e batteri.

CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI  
PER ASSISTENZA E CONSIGLI.

 039 227 9299

 [info@kontak.it](mailto:info@kontak.it)



kontak.it